

No se deben utilizar productos que puedan degradar o dañar los materiales y que disminuyan su capacidad protectora.

Recomendamos que la mascarilla se seque completamente dentro de las 2 horas después de justo haberla lavado..

No secar o higienizar en un horno microondas.

Durante el secado y almacenamiento posterior, hay que evitar los ambientes en que la mascarilla pudiese volver a contaminarse. Después de cada ciclo de lavado, hay que realizar una inspección visual (con guantes de protección o con las manos limpias). En caso de detectar algún daño en la mascarilla (menor ajuste, deformación, desgaste, etc...), deberá desecharse.



Eliminación de la mascarilla

- Para reducir los riesgos del uso de estas mascarillas hay que advertir que una vez sobrepasado el número máximo de lavados, se tiene que desechar.
- Procedimiento para desechar la mascarilla: Las mascarillas se tienen que desechar en un contenedor en una bolsa de plástico (preferiblemente con tapa y control no manual. Recomendamos utilizar doble bolsa para preservar el contenido de la primera bolsa en caso de rotura de la bolsa exterior.
- Especificación UNE 0065: 2020-20 – Las mascarillas utilizadas también se pueden desechar en contenedores para restos biológicos.

- Duración de uso máximo continuado: Por cuestiones de comodidad y de higiene, se recomienda no utilizar la mascarilla por un tiempo superior a 4 horas. En caso que se humedezca o que se deteriore por el uso, se recomienda sustituirla por otra.
- Durante el período de uso, la mascarilla sólo se puede retirar de acuerdo con las instrucciones **de retirada de la mascarilla**.
- La mascarilla se tiene que lavar cada vez que se ensucie, se humedezca o no se pueda poner correctamente sobre la cara.
- No utilizar la mascarilla si está sucia o húmeda.
- En caso que se tenga que almacenar temporalmente hay que evitar el contacto con cualquier superficie.
- Tampoco debe colocarse en posición de espera en la frente o debajo de la barbilla durante y después de su uso.



C. De l'Om, 7-9 · 08001 Barcelona | 934 428 498
shop@esteltapia.org · www.esteltapia.org



ecotó

Mascarillas higiénicas

Características y recomendaciones de uso

Diseñadas y confeccionadas en el barrio del Raval de Barcelona por personas en situación de vulnerabilidad, las mascarillas de tela reutilizables Ecotó se ciñen a la Norma UNE 0065 que regula la confección de máscaras higiénicas reutilizables.

.....

Características:

- Tejido interior (filtro): 1 capa de microfibra 100% poliéster hidrófugo antibacteriano libre de tóxicos.
- Tejido exterior: 1 capa de algodón 100%, con diferentes estampados disponibles.
- Férula nasal para un mejor ajuste y una mayor protección.
- Doble cordón elástico, muy flexible y adaptable, para un ajuste perfecto en las orejas.

Sobre el tejido sanitario usado como filtro:

- Eficacia en la filtración de Aerosoles > 96%
- Eficacia en la filtración de partículas > 92%
- Eficacia en la filtración bacteriana BFE > 95%
- Transpirabilidad: <60 Pa / cm2

3 Tallas disponibles:

- Talla XS. De 4 a 8-9 años. 16 cm de ancho x 7 cm de alto

- Talla S. De 8-9 a 14 años. 17,5 cm de ancho x 7,5 cm de alto
- Talla única adulto. 19,5 cm de ancho x 8,5 cm de alto


XS	S	Adulto
-----------	----------	---------------

Aviso importante: Este dispositivo no es un producto sanitario en el sentido de la directiva 93/42 o del reglamento UE/2017/745, ni un Equipo de Protección Individual (EPI) en el sentido del reglamento UE/2016/425. Las mascarillas higiénicas son de uso personal y no sustituyen las medidas de higiene ni de distanciamiento social recomendadas por el Ministerio de Sanidad.


Colocación de la mascarilla

Recomendamos poner la mascarilla sobre la piel (sin pelo)

1. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica antes de manipular la mascarilla.
2. Identificar la parte superior de la mascarilla. Colocar la mascarilla en la cara, a la altura de la nariz. Si dispone de pinza nasal, ajustarla a la nariz.

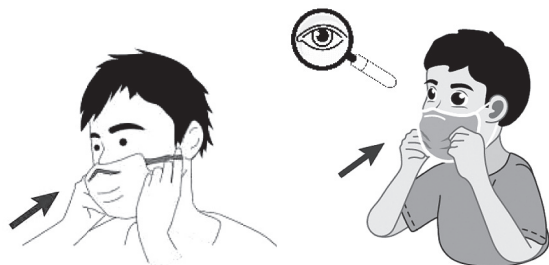


3. Sostener la mascarilla desde el exterior y sujetar las gomas a los dos lados de las orejas, sin cruzarlas.

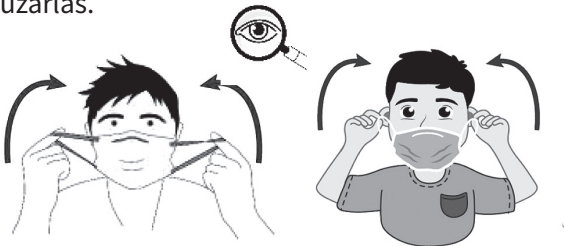

4. Ajustar la parte inferior de la mascarilla a la barbilla. Verificar que la mascarilla cubre la barbilla.



5. Pellizcar la pinza nasal, en caso de tenerla, con las dos manos para ajustarla a la nariz.

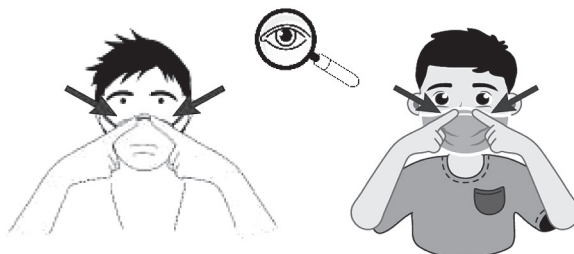

6. Verificar que la mascarilla esté en su sitio. Para ello hay que verificar el sellado y la ausencia de molestias respiratorias.

7. Una vez ajustada, no tocar la mascarilla con las manos. Si el usuario necesita tocar la mascarilla, debe lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica.

Retirada de la mascarilla

Per evitar la contaminación al retirar la mascarilla, han de seguirse los pasos siguientes:

1. Quitarse los guantes de protección.
2. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica.
3. Retirar la mascarilla sin tocar la parte frontal.
4. Si se reutiliza la mascarilla **ver el apartado de lavado y secado de la mascarilla**. En caso de desecho, seguir las indicaciones de eliminación.
5. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica.

Lavado y secado de la mascarilla



El lavado y secado de la mascarilla se tiene que hacer de acuerdo a las siguientes recomendaciones:

Se puede lavar la mascarilla más de 65 veces a una temperatura no superior a 60° (más de 85 lavados garantizados a una temperatura inferior a 35°, preferiblemente con un ciclo corto.)

Hay que evitar el contacto entre una mascarilla sucia (para lavar) y la ropa limpia. La persona encargada del lavado tiene que protegerse para manipular las mascarillas usadas.