

No s'han d'utilitzar productes que puguin degradar o malmetre els materials i que disminueixin la seva capacitat protectora.

Recomanem que la mascareta s'assequi completament just després d'haver-la rentat.

No assecar o higienitzar a un forn microones.

Durant l'assecat i l'emmagatzematge posterior, cal evitar els ambients en què la mascareta pogués tornar a contaminar-se. Després de cada cicle de rentat, cal realitzar una inspecció visual (amb guants de protecció o amb les mans netes). En cas de detectar algun dany a la mascareta (menor ajust, deformació, desgast, etc.), caldrà rebutjar-la.



### **Eliminació de la mascareta**

- Per reduir els riscos de l'ús d'aquestes màscares cal advertir que un cop sobrepassat el nombre màxim de rentats, s'ha de rebutjar.
- Procediment per a rebutjar la mascareta: Les mascaretes s'han de rebutjar en un contenidor amb bossa de plàstic (preferiblement amb tapa i control no manual. Recomanem utilitzar doble bossa per a preservar el contingut de la primera bossa en cas de esquinçament de la bossa exterior.
- Especificació UNE 0065: 2020-20 – Les mascaretes utilitzades també es poden rebutjar en contenidors per a deixalles biològiques.
- Durada d'ús màxim continuat: Per qüestions de comoditat i d'higiene, es recomana no fer servir la mascareta per un

temps superior a 4 hores. En cas que s'humitegi o que es deteriori per l'ús, es recomana substituir-la per una altra.

- Durant el període d'ús, la mascareta només es pot retirar d'acord amb les instruccions de **retirada de mascareta**.
- La mascareta s'ha de rentar cada vegada que s'embruti, s'humitegi o no es pugui posar correctament sobre la cara.
- No s'ha d'utilitzar la mascareta si està bruta o humida.
- En el cas que s'hagi d'emmagatzemar temporalment cal evitar el contacte amb qualsevol superfície.
- Tampoc s'ha de col·locar en posició d'espera al front o sota de la barbata durant i després de l'ús.



C. De l'Om, 7-9 · 08001 Barcelona | 934 428 498  
shop@esteltapia.org · www.esteltapia.org



# ecotó

## Mascaretes higièniques

### **Característiques i recomanacions d'ús**

Dissenyades i confeccionades al barri del Raval de Barcelona per persones en situació de vulnerabilitat, les mascaretes de tela reutilitzables Ecotó s'atenen a la Norma UNE 0065 que regula la confecció de màscares higièniques reutilitzables.

.....

### **Característiques:**

- Teixit interior (filtre): 1 capa de microfibra 100% polièster hidrofugat antibacterià lliure de tòxics.
- Teixit exterior: 1 capa de cotó 100%, amb diferents estampats disponibles.
- Fèrula nasal per a un còmode encaix i millor protecció.
- Doble cordó elàstic, molt flexible i adaptable, per un ajust perfecte a les orelles.

Sobre el teixit sanitari utilitzat com a filtre:

- Eficàcia a la filtració d'Aerosols > 96%
- Eficàcia a la filtració de partícules > 92%
- Eficàcia a la filtració bacteriana BFE > 95%
- Respirabilitat: <60 Pa / cm<sup>2</sup>

### **3 Talles disponibles:**

- Talla XS. De 4 a 8-9 anys. 16 cm d'ample x 7 cm d'alçada
- Talla S. De 8-9 anys a 14.. 17,5 cm d'ample x 7,5 cm d'alçada

- Talla única adult. 19,5 cm d'ample x 8,5 cm d'alçada


XS	S	Adult
----	---	-------

**Avís important:** Aquest dispositiu no és un producte sanitari en el sentit de la directiva 93/42 o del reglament UE/2017/745, ni un Equip de Protecció Individual (EPI) en el sentit del reglament UE/2016/425. Les mascaretes higièniques són d'ús personal i no substitueixen les mesures d'higiene ni de distanciament social recomanades pel Ministeri de Sanitat.


### Col·locació de la mascareta

Recomanem posar la mascareta sobre la pell (sense cabell).


1. Rentar-se les mans amb aigua i sabó o fregar-les amb una solució hidroalcohòlica abans de manipular la mascareta.
2. Identificar la part superior de la mascareta. Posicionar la mascareta a la cara, a l'alçada del nas. Si disposa de pinça nasal, ajustar-la al nas.

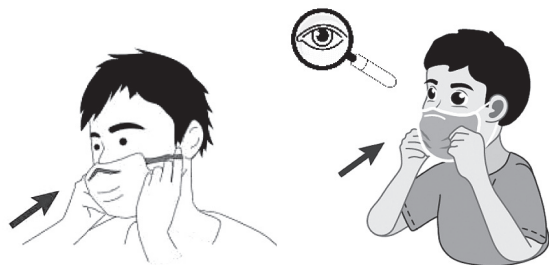


3. Sostenir la mascareta des de l'exterior i subjectar les gomes als dos costats de les orelles, sense creuar-les.

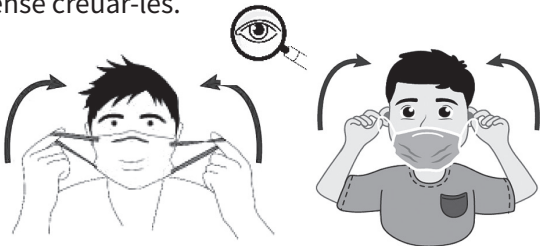

4. Ajustar la part inferior de la mascareta a la barbata. Verificar que la mascareta cobreixi la barbata.

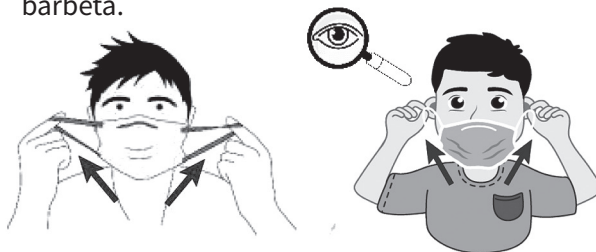

5. Pessigar la pinça nasal, en cas d'haver-n'hi, amb les dues mans per ajustar-la al nas.

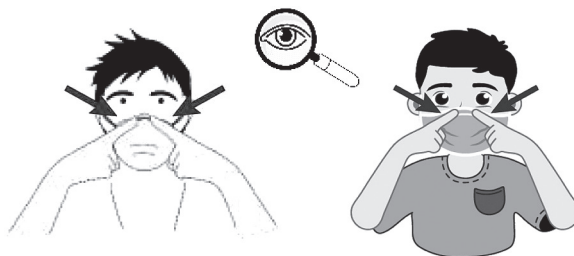

6. Verificar que la mascareta sigui a lloc. Per això cal verificar el segellat i l'absència de molèsties respiratòries.

7. Un cop ajustada, no tocar la mascareta amb les mans. Si l'usuari necessita tocar la mascareta, ha de rentar-se les mans amb aigua i sabó o fregar amb una solució hidroalcohòlica.

### Retirada de la mascareta

Per evitar la contaminació en retirar una mascareta, cal seguir els passos següents:

1. Llevar-se els guants de protecció.
2. Rentar-se les mans amb aigua i sabó o fregar-les amb una solució hidroalcohòlica.
3. Retirar la mascareta sense tocar-ne la part frontal.
4. Si es reutilitza la mascareta **veure l'apartat de rentat i assecat de la mascareta**. En cas de rebuig, seguir les indicacions d'eliminació.
5. Rentar-se les mans amb aigua i sabó o fregar-les amb una solució hidroalcohòlica.

### Rentat i assecat de la mascareta



El rentat i assecat de la mascareta s'ha de fer d'acord amb les següents recomanacions:

Es pot rentar la mascareta més de 65 vegades a una temperatura no superior a 60° (més de 85 rentats garantits a una temperatura inferior a 35°, preferiblement amb un cicle curt.)

Cal evitar el contacte entre una mascareta bruta (a rentar) i la roba neta. La persona encarregada del rentat ha de protegir-se per manipular les mascaretes usades.